



Gaia SVX-20371-06

Pedikérske kreslo


Vitajte pri používaní našich produktov.
Pred použitím produktov si pozorne prečítajte túto príručku používateľa.

1. O tejto príručke

Táto príručka by sa mala používať iba ako referencia na obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa táto príručka použije na iné účely, naša spoločnosť nenesie žiadne príslušné následky a zodpovednosť.


Všetky informácie v tejto príručke sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať a prekladať v žiadnej časti tejto špecifikácie bez písomného súhlasu našej spoločnosti.

2. Upozornenie

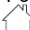- Pri výmene elektrických komponentov alebo údržbe a čistení prístrojov sa musí odpojiť napájanie.
- Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nestúpajte na toto zariadenie.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a neumiestnite ho na miesto, kde sa ho môžu deti dotýkať. Pri odchode nastavte opierku chrbta do najvyššej polohy.
- Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta, ako je kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inej poruche; Ovládače tiež držte mimo dosahu vody.
- Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa maľuje/natiera alebo kde sa privádza kyslík.
- Osoby s fyzickými prekážkami, poruchami hmatu, duševnými poruchami, nedostatkom skúseností, zdravého rozumu alebo deti nesmú zariadenie používať, pokiaľ nie sú sledované alebo inštruované personálom, ktorý môže byť zodpovedný za ich osobnú bezpečnosť.
- Ak je zástrčka poškodená, alebo v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva kontaktujte distribútora, servisné stredisko alebo pracovníka s príslušnými zručnosťami a skúsenosťami.
- Počas manipulácie s lôžkom sa prosím uistite, že v mieste zdvihu nie je žiadna dostupná vec.
- Operáciu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Pôvodný návod
-  Len na použitie v interiéri.


3. Bezpečnostné opatrenia

- Tento produkt by mala používať skúsená osoba, ktorá musí byť oboznámená s konštrukciou produktu, výkonom a návodom a bude vykonávať pravidelnú údržbu.
- Pred inštaláciou, prevádzkou a nastavením si pozorne prečítajte tento návod a dobre ho, prosím, uschovajte.
- Tento výrobok sa nesmie používať na jednostranné alebo jednobodové zaťaženie.
- Dodržiavajte pravidlá bezpečnostnej prevádzky, produkt sa nesmie preťažovať a aby sa zabezpečilo, že bezpečnostné ochranné vybavenie produktu je úplné a spoľahlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelne utahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnením, posúvaním, vibráciami a odpadnutím.
- Počas údržby nesmie obsluha ľubovoľne rozoberať žiadne časti lôžka.
- Tento produkt nie je povolené prevádzkovať, keď má poruchu. Ak sa zistí abnormálny jav alebo abnormálny zvuk, musí sa okamžite zastaviť a skontrolovať a po odstránení poruchy je možné pokračovať v práci.
- Obsluha musí byť oboznámená s preventívnymi opatreniami popísanými vo všetkých častiach návodu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb a produktu.
- Tento produkt je vybavený trojžilovým napájacím káblom. Napájací kábel musí byť zapojený do trojtorvovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. Nie je to len preto, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, ale aj preto, aby produkt mohol správne fungovať.
- Prevádzkujte výrobok prísne v súlade s výstražným štítkom, ktorý je na ňom nalepený.
- Počas ovládania zdvíhania musí byť tlačidlo nepretržite stlačené, kým sa produkt nedostane do vhodnej polohy.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že nepretržitý pracovný čas by mal byť max. 2 min. ZAPNUTÉ: 18Min VYPNUTÉ, pri prevádzke motora.
- Údržbu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Po každom ošetrovaní použité na odstránenie prachu alebo škvŕn z produktu iba neutrálny roztok.
- Pri nastavovaní každej časti držte ruky, nohy a hlavu mimo polohy označenej šípkou.
(Ako je znázornené na fotografii)

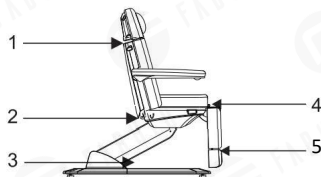


4. Inštalácia

1. Výrobok umiestnite na vhodné miesto podľa celkového usporiadania, denného alebo umelého osvetlenia a prevádzkového stavu salónu alebo domácnosti. a uchovávajte ho v čistom, suchom a chladnom prostredí.
2. Otvorte krabicu a skontrolujte, či je výrobok neporušený a či je príslušenstvo alebo náhradné diely kompletné. Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte, prosím, distribútora alebo nás.
3. Inštalácia
Umiestnite výrobok do správnej polohy. Upozorňujeme, že na upevnenie lôžka nie je potrebné inštalovať na podlahu ďalšie skrutky, pretože pôvodný dizajn zohľadnil stabilitu.
Uistite sa však, prosím, že je výrobok umiestnený na pevnom a rovnom podklade, aby sa predišlo akejkoľvek nehode. Ak sa výrobok otáča alebo nakláňa v dôsledku drsnej podlahy, nastavte štyri kusy plastových nožičiek (M10x30) a matic (M10) šesťhranným vidlicovým kľúčom, ktoré sú upevnené na spodnom paneli tak, aby bol produkt stabilný.
4. Napájanie
Napájanie je 100V-120V, alebo 220-240V, 50/60Hz, striedavý prúd (AC).
5. Správne pripojte zástrčku produktu k zdroju napájania. (Ako je znázornené na fotografii)

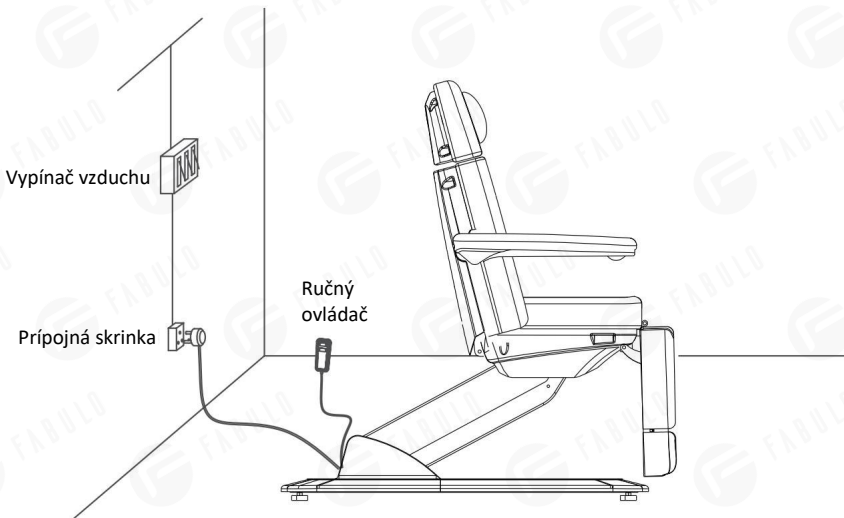

5. Konštrukcia produktu


- Toto kozmetické lôžko sa skladá z ovládacej skrinky, motora, hardvéru, plastových dielov a kože. Medzi nimi ovládacia skrinka riadi činnosť motorov a ručného ovládača.
- Tento produkt má nastavenie uhla operadla, nastavenie uhla sedadla a nastavenie zdvíhu, čo je celková a integrálna konštrukcia. (Ako je znázornené na fotografii)

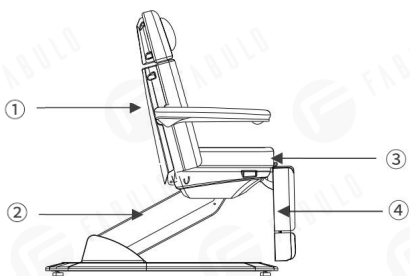


- ① nastavenie uhla operadla
- ② nastavenie zdvíhu celého lôžka
- ③ nastavenie uhla sklonu sedadla
- ④ nastavenie uhla opierky nôh (manuálne nastavenie)

6. Návod na použitie

1. Štandardná konfigurácia (Ručný ovládač)

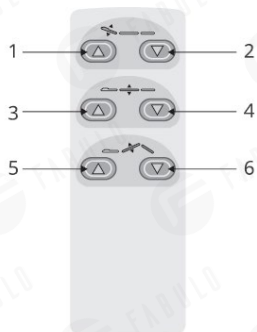


2. Voliteľná konfigurácia (Nožný ovládač)

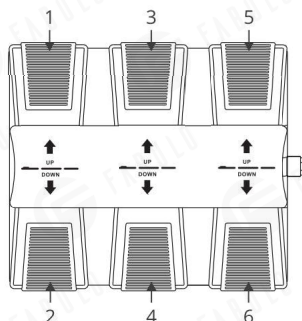

Č.	Popis	Činnosť
1	Operadlo sa posúva nahor	Operadlo sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
2	Operadlo sa posúva nadol	Operadlo sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
3	Celá posteľ sa posúva nahor	Lôžko sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
4	Celá posteľ sa posúva nadol	Lôžko sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
5	Sedadlo nahor	Stlačením tlačidla sa sedadlo plynule nakláňa.
6	Sedadlo nadol	Stlačením tlačidla sa sedadlo plynule vyrovnáva.

7. Upozornenia pre prevádzku




- Nie je dovolené nakláňať sedadlo, keď je posteľ v najnižšej polohe.

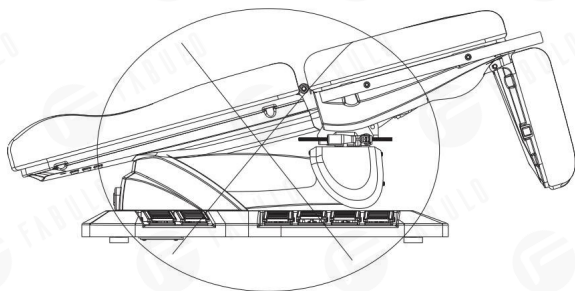

Tento obrázok produktu slúži len na zobrazenie, konkrétnu konštrukciu produktu zistíte pri skutočnom produkte.

8. Technické parametre

Napájanie	AC 100-120V alebo AC 220-240V alebo AC 100-240V,50/60HZ
Maximálny výkon	300W
Teplota prostredia	0°C~+40°C
Relatívna vlhkosť	30%~90%
Menovité zaťaženie zdvíhania	175kg
Rozmery balenia	1280x690x690mm
Čistá hmotnosť	64kg.
Celková hmotnosť	77kg.

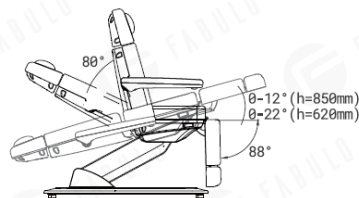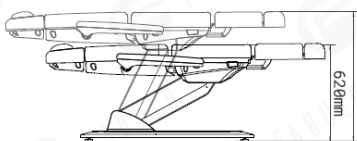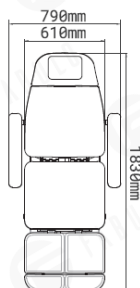

9. Údržba

- Po každom ošetrení použite iba neutrálny roztok na odstránenie prachu, škvŕn na koži, kovových častiach alebo iných častiach. Dezinfekčné roztoky ako alkohol, kyseliny alebo alkalické roztoky sú zakázané. Je to preto, aby sa predišlo skráteniu životnosti komponentov.
- Pravidelne (raz ročne) namažte pohyblivé časti.

10. Schéma zapojenia obvodov systému



11. Riešenie problémov

Ako sa prejavuje porucha	Príčina	Riešenie
Motor nefunguje normálne	1. Napájací kábel je odpojený alebo nie je dobre zapojený.	1. Pripojte napájací kábel alebo ho dobre zapojte.
	2. Zlá kvalita ručného ovládača alebo nožného ovládača.	2. Vymeňte ručný ovládač alebo nožný ovládač.
	3. Nízka kvalita ovládacej skrinky.	3. Ohľadom riešenia problémov sa obráťte na stredisko údržby alebo dodávateľa.
	4. Roztrhnutie zadnej časti motora.	
	5. Motor je poškodený.	
Abnormálny zvuk	1. V rotujúcich častiach chýba mazací olej.	1. Pridajte mazací olej.
	2. V rotačných polohách (ako sú závesy, súpravy POM, plynový zdvih) je nedostatok mazacieho oleja.	2. Pridajte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motora.	3. Vymeňte motor.

Ak sa problém nevyrieši ani po vyššie uvedených operáciách, obráťte sa na stredisko údržby alebo dodávateľa, aby ho vyriešili.



Nevyhadzujte staré alebo chybné zariadenia do domáceho odpadu; malo by sa to robiť len prostredníctvom verejných zberných miest.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu produktu. Táto príručka slúži len ako referencia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.