



Stellar SVX-10362-67


Masážny stôl

Vítajte pri používaní našich produktov.
Pred použitím produktov si pozorne prečítajte návod na použitie.
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zlepšovať dizajn a
upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia.

1. O tejto príručke


Táto príručka by sa mala používať iba ako referencia na obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa táto príručka použije na iné účely, naša spoločnosť nenesie žiadne príslušné následky a zodpovednosť. Všetky informácie v tejto príručke sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať a prekladať v žiadnej časti tejto špecifikácie bez písomného súhlasu našej spoločnosti.

2. Upozornenie

- Pri výmene elektrických komponentov alebo údržbe a čistení prístrojov sa musí odpojiť napájanie.
- Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nestúpajte na toto zariadenie.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a neumiestnite ho na miesto, kde sa ho môžu deti dotýkať. Pri odchode nastavte opierku chrbta do najvyššej polohy.
- Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta, ako je kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inej poruche; Ovládače tiež držte mimo dosahu vody.
- Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa maľuje/natiera alebo kde sa privádza kyslík.
- Osoby s fyzickými prekážkami, poruchami hmatu, duševnými poruchami, nedostatkom skúseností, zdravého rozumu alebo deti nesmú zariadenie používať, pokiaľ nie sú sledované alebo inštruované personálom, ktorý môže byť zodpovedný za ich osobnú bezpečnosť.
- Ak je zástrčka poškodená, alebo v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva kontaktujte distribútora, servisné stredisko alebo pracovníka s príslušnými zručnosťami a skúsenosťami.
- Počas manipulácie s lôžkami sa prosím uistite, že v mieste zdvíhu nie je žiadna dostupná vec.
- Operáciu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Pôvodný návod
-  Len na použitie v interiéri.

3. Bezpečnostné opatrenia

- Tento produkt by mala používať skúsená osoba, ktorá musí byť oboznámená s konštrukciou produktu, výkonom a návodom a bude vykonávať pravidelnú údržbu.
- Pred inštaláciou, prevádzkou a nastavením si pozorne prečítajte tento návod a dobre ho, prosím, uschovajte.
- Tento výrobok sa nesmie používať na jednostranné alebo jednobodové zaťaženie.
- Dodržiavajte pravidlá bezpečnej prevádzky, produkt sa nesmie preťažovať a aby sa zabezpečilo, že bezpečnostné ochranné vybavenie produktu je úplné a spoahlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelne utahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnením, posúvaním, vibráciami a odpadnutím.
- Počas údržby nesmie obsluha ľubovoľne rozoberať žiadne časti lôžka.
- Tento produkt nie je povolené prevádzkovať, keď má poruchu. Ak sa zistí abnormálny jav alebo abnormálny zvuk, musí sa okamžite zastaviť a skontrolovať a po odstránení poruchy je možné pokračovať v práci.
- Obsluha musí byť oboznámená s preventívnymi opatreniami popísanými vo všetkých častiach návodu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb a produktu.
- Tento produkt je vybavený trojžilovým napájacím káblom. Napájací kábel musí byť zapojený do trojtorvovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. Nie je to len preto, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, ale aj preto, aby produkt mohol správne fungovať.
- Prevádzkujte výrobok prísne v súlade s výstražným štítkom, ktorý je na ňom nalepený.
- Počas ovládania zdvíhania musí byť tlačidlo nepretržite stlačené, kým sa produkt nedostane do vhodnej polohy.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že nepretržitý pracovný čas by mal byť max. 2 min. ZAPNUTÉ: 18Min VYPNUTÉ pri prevádzke motora.
- Údržbu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Po každom ošetroaní použite na odstránenie prachu alebo škvŕn z produktu iba neutrálny roztok.
- Pri nastavovaní každej časti držte ruky, nohy a hlavu mimo polohy označenej šípkou. (Ako je znázornené na fotografii)

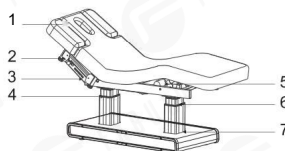


4. Inštalácia

1. Výrobok umiestnite na vhodné miesto podľa celkového usporiadania, denného alebo umelého osvetlenia a prevádzkového stavu salónu alebo domácnosti. a uchovávajte ho v čistom, suchom a chladnom prostredí.
2. Otvorte krabicu, aby ste skontrolovali, či je výrobok neporušený a či je príslušenstvo alebo náhradné diely kompletne. Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte, prosím, distribútora alebo nás.
3. Inštalácia

Umiestnite výrobok do správnej polohy. Upozorňujeme, že na upevnenie lôžka nie je potrebné inštalovať na podlahu ďalšie skrutky, pretože pôvodný dizajn zohľadnil stabilitu.


Uistite sa však, prosím, že je výrobok umiestnený na pevnom a rovnom podklade, aby sa predišlo akejkolvek nehode. Ak sa výrobok otáča alebo nakláňa v dôsledku nerovného povrchu, nastavte štyri kusy plastových nožičiek (M10x30) a matíc (M10) šesťhranným vidlicovým kľúčom, ktoré sú upevnené na spodnom paneli, aby sa zabezpečilo, že výrobok bude stabilný.

4. Správne pripojte zástrčku produktu k zdroju napájania. (Ako je znázornené na fotografii)

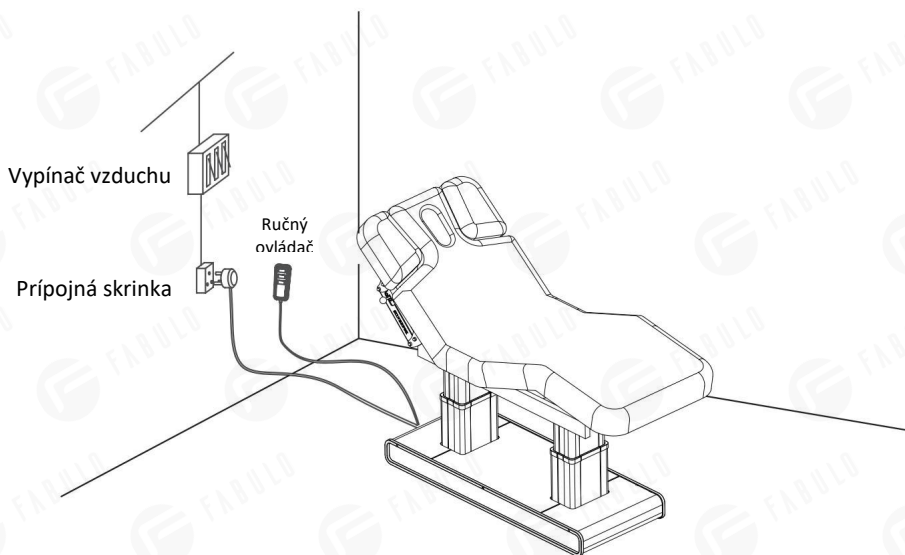

5. Konštrukcia produktu


- Tento produkt sa skladá z ovládatej skrinky, motora, drevenej časti, hardvéru, plastových častí a kože. Medzi nimi ovládacia skrinka riadi činnosť motorov a ručného ovládača.
- Tento produkt má nastavenie uhla operadla, nastavenie uhla sedadla a nastavenie zdvihu, čo je celková a integrálna konštrukcia. (Ako je znázornené na fotografií)

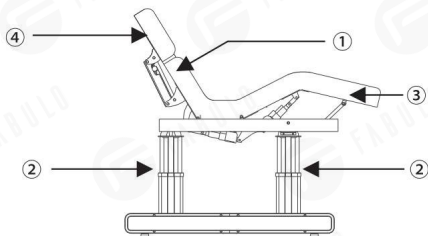

- ① nastavenie uhla operadla
- ② nastavenie zdvihu
- ③ nastavenie uhla opierky nôh
- ④ nastavenie sklonu laktovej opierky (manuálne)

6. Návod na použitie

Voliteľná konfigurácia (Ručný ovládač)

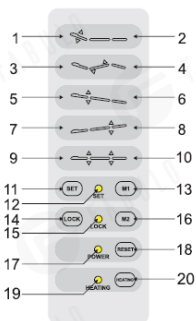

.	Popis	innos
1	Operadlo ide hore	Operadlo sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
2	Operadlo ide dole	Operadlo sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
3	Opierka nôh ide hore	Stlačte tlačidlo, opierka nôh sa posúva nahor, jej uhol sa zmenší na minimum.
4	Opierka nôh ide dole	Stlačte tlačidlo, opierka nôh sa posúva nadol, jej uhol sa posunie na maximum.
5	Nakláňa sa hore v kladnom uhle	Stlačením tlačidla sa uhol sklonu produktu plynulo zvyšuje v kladnom smere.
6	Nakláňa sa dole v kladnom uhle	Stlačením tlačidla sa uhol sklonu produktu plynulo znižuje v kladnom smere.
7	Nakláňa sa hore v zápornom uhle	Stlačením tlačidla sa uhol sklonu produktu plynulo zvyšuje v zápornom smere.
8	Nakláňa sa dole v zápornom uhle	Stlačením tlačidla sa uhol sklonu produktu plynulo znižuje v zápornom smere.
9	Dvíha sa	Celá stolička/stôl sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
10	Spúšťa sa	Celá stolička/stôl sa plynule spúšťa stlačením tlačidla,
11	Zadajte nastavenie pamäte polohy (voliteľné)	Kontrolka sa rozsvieti po stlačení tlačidla na 2 sekundy a potom vstúpite do stavu nastavenia pamäte polohy.
12	Kontrolka nastavenia pamäte (voliteľné)	
13	Nastavenie pamäte polohy 1 (voliteľné)	<p>1. Stlačením tlačidla „SET“ na 2 sekundy vstúpite do stavu nastavenia pamäte polohy, indikátor nastavenia polohy pamäte sa rozsvieti. Nastavte požadovanú polohu a stlačením tlačidla „M1“ sa akcie uložia do pamäte. Opustíte stav nastavenia pamäte polohy a indikátor zhasne.</p> <p>2. Stlačením tlačidla sa automaticky presuniete do stavu akcie v pamäti.</p>

Č.	Popis	Činnosť
14	Bezpečnostné tlačidlo	Podržte stlačené tlačidlo "bezpečnostného zámku" na približne dve sekundy, pričom sa rozsvieti červené svetlo okolo tlačidla, žiadne tlačidlá sa nedajú ovládať okrem tlačidla bezpečnostného zámku. Opätovne stlačte tlačidlo bezpečnostného zámku na približne dve sekundy, červené svetlá tlačidla zhasnú a všetky tlačidlá sa vrátia do normálneho prevádzkového stavu.
15	Kontrolka bezpečnostného tlačidla	
16	Nastavenie polohy pamäte 2 (voliteľné)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla „SET“ na 2 sekundy vstúpite do stavu nastavenia pamäte polohy, indikátor nastavenia polohy pamäte sa rozsvieti. Nastavte požadovanú polohu a stlačením tlačidla „M2“ sa akcie uložia do pamäte. Opustíte stav nastavenia pamäte polohy a indikátor zhasne. 2. Stlačením tlačidla sa automaticky presuniete do stavu úkonu z pamäte.
17	Indikátor napájania	Ručný ovládač je správne pripojený k zdroju napájania, kontrolka svieti. V opačnom prípade svietiť nebude.
18	Resetovacie tlačidlo s jedným tlačidlom	Stlačte tlačidlo, výška lôžka automaticky dosiahne najnižšiu polohu.
19	Kontrolka funkcie ohrevu (voliteľné)	Stlačením tlačidla sa svetlo rozsvieti, funkcia ohrevu funguje; opätovným stlačením tlačidla svetlo zhasne, funkcia ohrevu sa zastaví.
20	Ohrev (voliteľné)	


Poznámky:

1. Funkcia ohrevu je dostupná len pre modely s funkciou ohrevu.
2. Rôzne ručné ovládače by sa mali vybrať podľa rôznych konfigurácií.

Nastavenie osvetlenia

Ovládanie ručným ovládačom





1. Podržte stlačené tlačidlo „SET“/ „LOCK“ na 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu regulácie osvetlenia
2. Stlačením „M1“ vyberte režim osvetlenia (celkom 16 druhov režimov)
3. Stláčaním tlačidla "M2" nastavíte jas (celkom 12 stupňov)
4. Po výbere režimu osvetlenia a jasú svetla podržte stlačené tlačidlo "SET"/"LOCK", aby ste ukončili nastavenie svetla.

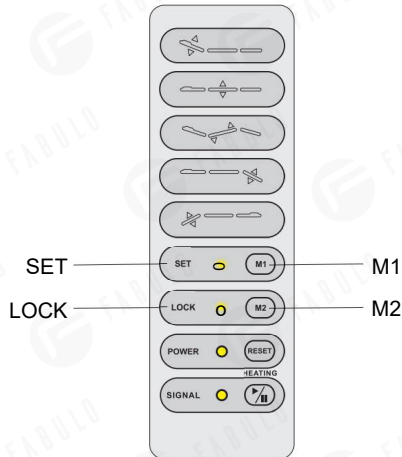

7. Technické Parametre

Napájanie	AC 100-120V alebo AC 220-240V alebo AC 100-240V, 50/60Hz
Maximálny výkon	300W
Teplota prostredia	0°C ~ + 40°C
Relatívna vlhkosť	30% ~ 90%
Menovité zaťaženie zdvíhania	175kg
Rozmery balenia	204x81x74cm


SVX-10362-67

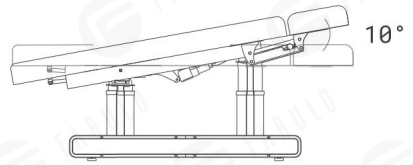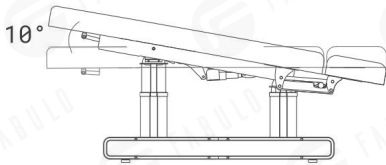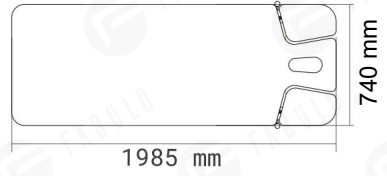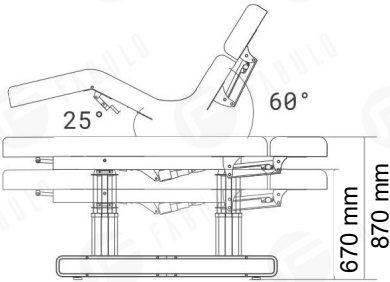

8. Údržba

1. Po každom ošetroení použite iba neutrálny roztok na odstránenie prachu, škvŕn na koži, kovových častiach alebo iných častiach. Dezinfekčné roztoky ako alkohol, kyseliny alebo alkalické roztoky sú zakázané. Je to preto, aby sa predišlo skráteniu životnosti komponentov.
2. Pravidelne (raz ročne) namažte pohyblivé časti.
3. Po použití nechajte čalúnenie v rovine pri 180°, aby ste predišli prehnutiu a pokrčeniu.

9. Schéma zapojenia

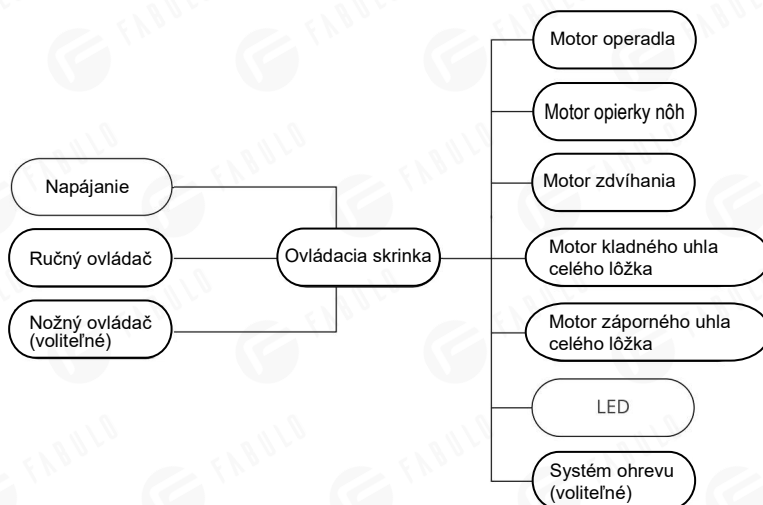

10. Riešenie problémov

Ako sa prejavuje porucha	Prí ina	Riešenie
Motor nefunguje normálne	1. Napájací kábel je odpojený alebo nie je dobre zapojený.	1. Pripojte napájací kábel alebo ho dobre zapojte.
	2. Zlá kvalita ručného ovládača alebo nožného ovládača.	2. Vymeňte ručný ovládač alebo nožný ovládač.
	3. Nízka kvalita ovládacej skrinky.	3. Ohľadom riešenia problémov sa obráťte na stredisko údržby alebo dodávateľa.
	4. Roztrhnutie zadnej časti motora.	
	5. Motor je poškodený.	
	6. Po stlačení tlačidla sa lôžko nepohlo.	1. Posuňte pohyblivú opierku nôh blízko k pevnej opierke nôh, skontrolujte, či je koncový spínač zopnutý a potom znova stlačte tlačidlá. 2. Otvorte pevný kryt opierky nôh a kryt operadla, skontrolujte obidva konce napájacieho kábla, či nie sú uvoľnené, ak nastane vyššie uvedená situácia, znova ich pripojte. 3. Ak sa problém nevyrieši ani po vyššie uvedených operáciách, obráťte sa na stredisko údržby alebo dodávateľa, aby ho vyriešili.
Abnormálny zvuk	1. V rotujúcich častiach chýba mazací olej.	1. Pridajte mazací olej.
	2. V rotačných polohách (ako sú závesy, súpravy POM, plynový zdvih) je nedostatok mazacieho oleja.	2. Pridajte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motora.	3. Vymeňte motor.

Ak sa problém nevyrieši ani po vyššie uvedených operáciách, obráťte sa na stredisko údržby alebo dodávateľa, aby ho vyriešili.



Nevyhadzujte staré alebo chybné zariadenia do domáceho odpadu; malo by sa to robiť len prostredníctvom verejných zberných miest.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu produktu. Táto príručka slúži len ako referencia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.